

BAUSCH+LOMB
博士倫 蕾絲漾眸彩色軟式隱形眼鏡
LACELLE Young Color Soft Contact Lens

藥商名稱:博士倫股份有限公司
藥商地址:台北市大安區敦化南路二段95號16樓
製造廠名稱:DUEBA CONTACT LENS
製造廠地址:(Beommul-dong, 301 3F, 302 3F)
93 Beoman-ro, Suseong-Gu, Daegu, Korea
消費者服務專線:0800-004-088
製造批號/保存期限請見外包裝標示
使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。
衛部醫器輸字第032624號 TW-VC-20190902-2

【產品敘述】

蕾絲漾眸彩色軟式隱形眼鏡是每日配戴型軟式親水性的非球面隱形眼鏡,與角膜形狀吻合。全系列皆採用FDA認證色素,確保配戴安全舒適。

【鏡片規格】

鏡片材質:2-HEMA, GMA, NVP, AIBN, EGDMA				
含水量:38%				
中心厚度:0.044 ~ 0.127mm (依度數不同)				
透光率:95%				
透氧率: $9.5 \times 10^{-11}(\text{cm}^2/\text{s})[(\text{mL}\text{O}_2)/(\text{mL}\cdot\text{mmHg})]$ @35°C Polarographic				
直徑:14.3 mm				
基弧:8.8 mm				
屈光度範圍:0.00D ~ -10.00D 0.00D至-6.00D(0.25 step) -6.50D至-10.00D(0.50 step)				
顏色:				
深情黑 (Black)	曖昧可可 (Choco)	告白灰 (Gray)	幻想粉 (Brown)	迷戀紫 (Violet)
單彩	單彩	三彩 (灰棕黑)	三彩 (棕粉黑)	三彩 (藍紫黑)
包裝方式:PP塑膠盒裝/玻璃瓶裝				
配戴方式:日戴型				
拋棄週期:≤90天				

【產品用途描述】

附著於眼球、調整視力使用的單焦點鏡片。

【使用時間和期限】

日戴型隱形眼鏡

使用時間:我們建議您配戴隱形眼鏡時間為每天8小時。

使用期限:請遵照眼科醫師或合格驗光人員的建議時間更換鏡片。即使同類產品中,使用時間和週期會因個人使用方式而不同,我們建議您每30天回診眼科醫師或回訪驗光人員,以評估配戴情況。根據眼科醫師或合格驗光人員的一般建議,彩色隱形眼鏡更新鏡片時間為≤90天(包含30天、60天、90天等配戴週期)。

【鏡片配戴方式及注意事項】

1. 鏡片清洗方式鏡片使用方法

- 配戴前之準備

a.請遵照原廠使用說明書或是遵照眼科醫師或合格驗光人員指示使用。

b.永遠在接觸鏡片前先洗淨雙手。

2. 鏡片配戴方法

· 配戴時之準備

a.使用生理食鹽水沖洗鏡片。

b.將鏡片置於右手食指指腹尖端,將右手中指移到接近下眼瞼的地方後,拉開下眼皮,再以左手中指拉開上眼皮。

c.緩慢地將鏡片移向眼球處並輕柔地將鏡片戴上。配戴鏡片時請勿閉眼。

d.確認鏡片已配戴於正確的位置後,再將手指移開。

· 鏡片從眼睛卸取方法

a.在移除鏡片前,請先確認鏡片在眼球的。

b.用左手手指固定上眼皮,同一手的食指固定下眼皮,輕柔地將鏡片從拇指與食指間捏擠出來。

【鏡片保存及保養方式】

1. 鏡片清洗方式

a.將鏡片放在手掌心,倒二至三滴清潔液於鏡片後,用另一手食指指腹搓揉鏡片。

b.清洗後,以生理食鹽水將鏡片沖洗乾淨,將鏡片分別置入水盒中再將鏡片浸泡於食鹽水或保存液中,需避免左右眼放置位子對調。

2. 鏡片消毒方式

a.化學消毒法是將鏡片放置於水盒中,並浸泡在消毒專用的保養液。

【注意事項/不適合使用原因】

1. 需注意是否有任何眼睛疾病、眼睛受損或異常、或過敏反應,可能會因配戴鏡片而讓病情惡化。
2. 若有任何可能影響眼睛狀況的全身性疾病,配戴前請諮詢眼科醫師。
3. 請將取下的鏡片儲存於隱形眼鏡鏡片專用藥水。
4. 請選擇合格且適合搭配鏡片使用的清潔液及潤濕液。
5. 當眼睛感到異常或是有嚴重刺痛感,請停止使用並盡快就醫尋求眼科醫師診治。
6. 若因鏡片乾燥而造成視力模糊時,建議使用點眼液或滋潤液來保護眼睛。應可在眨眼後再度對焦。
7. 若在眼睛疲勞、睡眠不足、或長時間閱讀後,建議讓眼睛休息並切勿配戴隱形眼鏡。
8. 請選擇合格的生理食鹽水、清潔液、保存液搭配鏡片使用。不可使用自來水或是來路不明的產品清潔鏡片。
9. 不要讓肥皂、洗髮精、噴霧、及化妝品產品接觸到鏡片。建議先戴上鏡片,然後再化妝。
10. 請小心避免指甲刮傷鏡片表面。
11. 切勿重覆使用他人已配戴過之鏡片。
12. 若滅菌之鋁箔單片包裝有被開封過或破損,請勿使用。

【有效期限】

在於PP塑膠盒容器或玻璃瓶容器密封包裝的狀態下,從製造日期起計五年。

配戴隱形眼鏡操作方式暨注意事項

【警告】隱形眼鏡為直接配戴於眼角膜上之醫療器材，若不遵照鏡片使用方法或不遵守使用上的注意事項，會造成角膜潰瘍、角膜炎(含感染性角膜炎)、角膜浸潤、角膜糜爛、角膜水腫、結膜炎(含巨大乳突性結膜炎)、虹彩炎等傷害。這些傷害中，如果不盡快治療而置之不理，有可能致使眼睛失明。為了安全又正確地使用隱形眼鏡，務必詳閱原製造廠所提供之使用說明書，文字或內容文章有不清楚的地方，務必向眼科醫師詢問，並請妥善保留原製造廠所提供之使用說明書。

【軟式隱形眼鏡的處理方式】

一、注意事項：

- 1.初戴者，可從每天戴4至6小時開始，每日增加2小時。
- 2.若有明顯不適之情形應儘早回診檢查，一切正常則應於一星期後回診。
- 3.正常配戴下，請於30天內回診眼科醫師或回訪驗光人員，以評估配戴情況。鏡片配戴週期，可能會因依據個人體質及使用方式不同而調整。請依據眼科醫師或合格驗光人員的建議更新鏡片。
- 4.戴上鏡片後再化妝，摘下鏡片後再卸妝。
- 5.必須知道清潔液、生理食鹽水、保存液、酵素液或酵素片的功用，開瓶後保存期限以仿單內之規定為準。
清潔液-清洗鏡片，生理食鹽水-沖洗鏡片，保存液-浸泡及消毒鏡片，酵素液-去蛋白。
- 6.瓶蓋要朝上或側放，不得朝下擺放，以避免污染。
- 7.固定先摘戴一眼，再摘戴另一眼(如先右後左)，以免鏡片左右顛倒。
- 8.摘鏡片的食指、拇指指甲須剪短，以免摘鏡片時傷到眼球或隱形眼鏡。
- 9.戴鏡片時要先分辨鏡片的正(如碗狀)反(如碟狀)面。
- 10.所有與隱形眼鏡相關的物品，如鏡片、水盒或藥水等，不得擺放在潮濕處，如浴室。

二、鏡片配戴方法：

- 1.用中性肥皂清洗雙手，再擦乾雙手。
- 2.將鏡片置於右手食指指腹尖端，正面朝上。
- 3.以右手中指拉開下眼皮，左手中指拉開上眼皮。
- 4.兩眼直視前方，再將鏡片移至於黑眼珠上。
- 5.確認鏡片已戴上，輕轉眼球，再慢慢鬆開雙手。
- 6.若鏡片掉落地面或桌面，用姆指及食指抓取其邊緣即可取起。須重新洗乾淨、浸泡、消毒後再戴上(確定正反面)。

三、鏡片卸取方法：

- 1.眼睛正視前方。
- 2.以右手中指拉開下眼皮，左手中指拉開上眼皮。
- 3.以右手姆指及食指指腹尖端，輕置於鏡片下緣。
- 4.兩指合攏，輕輕取下鏡片。
- 5.若鏡片掉落地面或桌面，用姆指及食指抓取其邊緣即可取起。

四、鏡片的清洗及保養方式：

- 1.將鏡片放在左手掌心，清潔液搖勻後，倒一或二滴

在鏡片上。

- 2.以右手食指指腹，將鏡片呈放射狀向外搓揉20秒至30秒左右。
 - 3.以生理食鹽水將鏡片沖洗乾淨。
 - 4.將洗淨的鏡片分別置入水盒中(約七分滿的新鮮保存液)，浸泡6小時以上，才可取戴。
- 五、水盒的保養方式：

- 1.每次使用後，以清水沖洗乾淨，再用力甩乾後放置陰乾。
- 2.一星期消毒一次。用牙刷沾點"洗碗精"刷洗水盒凹槽處，再用熱水沖淋乾淨、放置陰乾即可。建議每三個月換新水盒。

六、酵素片的使用方法：

- 1.水盒中注入生理食鹽水，左右各投入一片酵素片，待其完全溶解。
- 2.事先以清潔液清洗鏡片，再用生理食鹽水沖淨。
- 3.浸泡在酵素溶液中約30分鐘(不可超過2小時)。
- 4.取出鏡片，用清潔液清洗，再用生理食鹽水沖淨。
- 5.浸泡在新鮮的保存液中6小時以上，才可取戴。

【禁忌及禁止】配戴隱形眼鏡者，需依照當下的眼睛或身體的疾病、生活習慣或生活環境的情況，有可能需暫時停止使用隱形眼鏡。請務必經過眼科醫師的診察，確認無礙於疾病及環境後，再使用隱形眼鏡。

【禁忌】·前眼部急性或亞急性發炎·眼睛感染·葡萄膜炎·眼瞼異常·角膜知覺低下·角膜上皮缺陷·乾眼及淚管缺陷·過敏·長時間生活在乾燥環境·長時間生活在粉塵、藥品等環境·其他不適合配戴隱形眼鏡者

【注意】

- 隱形眼鏡，請於醒著的時候使用，睡前請摘下。
- 屬每日拋棄式者，請每天更換新的鏡片(一旦摘下的鏡片，必須拋棄，不要重複配戴)。
- 其他型式者，請確實遵照原製造廠所提供之使用說明書進行清洗、清潔、保存、拋棄。
- 當配戴中鏡片破損時，請盡快找眼科醫師診治。
- 請不要使用有破損的鏡片。
- 請遵照鏡片更換頻率。
- 請遵照鏡片配戴時間，不要逾時配戴。
- 隱形眼鏡配戴時間因個人體質而不同，請務必遵照眼科醫師指示。
- 請定期做眼睛檢查。
- 當眼睛感到異常時，請盡快向眼科醫師診治。

【戴隱形眼鏡的危險】

在正確使用隱形眼鏡之下，仍然有可能使角膜內皮細胞減少等生理變化，或因戴隱形眼鏡的關係，鏡片使眼睛氧氣供應量降低，造成角膜上皮受傷或角膜新生血管等眼睛傷害的危險。為不致產生更嚴重的眼科疾病，有任何不適，請及早尋找眼科醫師診治，並定期檢查。